



SYSTEM INIEKCJI TYPU „PRE-LOADED” (FABRYCZNIE ZAŁADOWANY)



1
Otwórz jałowe opakowanie i umieść sterylny pojemnik na sterylnym polu.



2
Otwórz pojemnik.



3
Usuń płyn.



4
Chwyć iniektor w jego środkowej części.



5
Chwyć iniektor kciukiem i palcem wskazującym i naciśnij dwukrotnie, aż do zamknięcia urządzenia.



6
Dłonią naciśnij tłok aż do całkowitego przemieszczenia soczewki do kaniuli; upewnij się, że nie jest ona zablokowana. Wprowadź końcówkę kaniuli do cięcia i delikatnie rozpocznij implantację soczewki do torebki soczewki (oznaczenie „góra” musi być widoczne).